

Modalità di prelievo del tampone endocervicale per RICERCA DEL DNA DI
CHLAMYDIA T./NEISSERIA G. (multiplex real time pcr)


MATERIALE NECESSARIO PER LA RACCOLTA

Kit di prelievo di campioni endocervicali Xpert

Ciascun kit contiene una confezione sigillata contenente a sua volta:

- A) 1 confezione che comprende:
 - 1) 1 provetta contenente il reagente per il trasporto dei tamponi Xpert (tappo rosa)
 - 2) 1 tampone flocculato di prelievo sterile in confezione singola


- B) 1 tampone di pulizia sterile grande in confezione singola

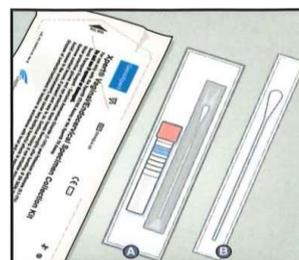


PROCEDURA DI PRELIEVO

1. Aprire il kit di prelievo del campione vaginale/endocervicale Xpert.


2. Prima di prelevare il campione endocervicale con il kit di prelievo dei campioni vaginali/endocervicali Xpert, rimuovere il muco in eccesso dall'orifizio cervicale e dalla mucosa circostante servendosi del tampone di pulizia grande in confezione singola. Aprire parzialmente la busta contenente il tampone di pulizia ed estrarre il tampone. Pulire l'orifizio cervicale e la mucosa circostante, quindi gettare il tampone. Nota: Se si prelevano più campioni, il muco in eccesso va rimosso solo una volta.

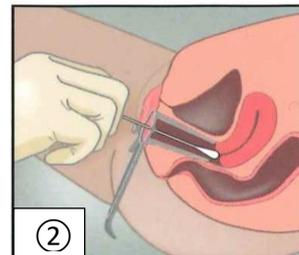

3. Aprire la confezione contenente la provetta con il tappo rosa contenente il reagente per il trasporto dei tamponi Xpert e il tampone di prelievo del campione in confezione singola. Mettere da parte la provetta prima di procedere.

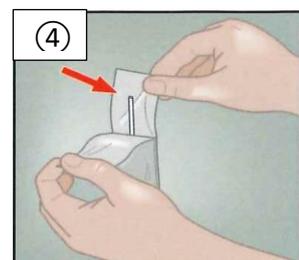


4. Aprire la confezione del tampone di prelievo staccando i lembi superiori della busta.

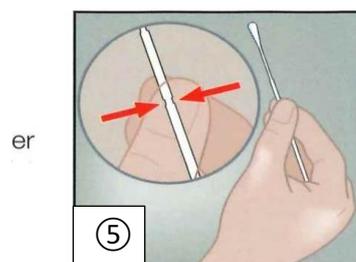


5. Estrarre il tampone, prestando attenzione a non toccare la punta ed evitando di appoggiarlo su una qualsiasi superficie. Se si tocca la punta morbida, lo si appoggia o lo si fa cadere, usare un nuovo kit di prelievo di campioni vaginali/endocervicali Xpert.

6. Inserire il tampone di prelievo nel canale endocervicale e ruotare con delicatezza il tampone in senso orario per 10-30 secondi nel canale endocervicale per garantire il prelievo di un campione adeguato.

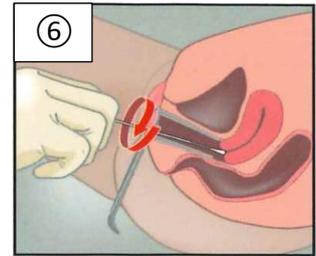


7. Estrarre il tampone con cautela. Tenendo il tampone nella stessa mano, svitare il tappo dalla provetta contenente il reagente per il trasporto dei tamponi Xpert.

8. Collocare immediatamente il tampone nella provetta con reagente per trasporto.

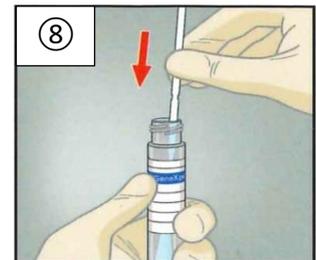

9. Identificare la linea perforata sullo stelo del tampone di prelievo. Rompere con attenzione lo stelo del tampone contro il lato della provetta in corrispondenza della linea perforata e gettare la parte superiore dello stelo del tampone; prestare attenzione a evitare di far schizzare il contenuto. Se il contenuto dovesse venire a contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone.

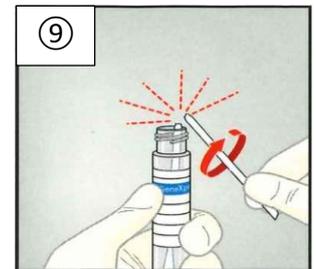

10. Richiudere con il tappo la provetta con reagente per trasporto e serrarlo saldamente.

11. Capovolgere o agitare con delicatezza la provetta 3-4 volte per eluire il materiale del tampone. Evitare la formazione di schiuma.

12. Applicare sulla provetta per trasporto l'etichetta con le informazioni di identificazione del campione, compresa la data del prelievo, secondo necessità.



13. Trasportare e conservare i campioni su tampone nella provetta contenente il reagente per il trasporto dei tamponi Xpert rispettando le condizioni appropriate per il saggio Xpert CT/NG.